



משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

שרותי בריאות הציבור
המעבדה הארצית לבריאות הציבור
The National Public Health Laboratory

הנחיות למשלוח דגימות למרכז הארצי לעגבת:

1. יש לשלוח 2-3 מ"ל של דגימת נסיוב ו/או נוזל שדרה, מהוצאה טרייה (תוך 48 שעות), במבחנת פלסטיק (12x75) פקוקה היטב. במקרים מיוחדים ניתן לשלוח דגימה בנפח קטן יותר, אך בכל מקרה לא פחות מ- 0.5 מ"ל.
 2. לדגימה הנשלחת יש לצרף טופס נלווה המפרט את פרטי הנבדק ונטילת הדגימה.
 3. יש לסמן את מבחנת הדגימה והטופס הנלווה בסימון חד-חד ערכי.
 4. אין לשלוח דגימת דם מלא (גם לא במבחנת ג'ל).
 5. אין לשלוח דגימת נסיוב המוליטית או שומנית או עכורה כתוצאה מזיהום.
 6. אין לשלוח דגימת נוזל שידרה דמית.
 7. אין לשלוח דגימת נוזל שדרה לניפוי, אלא כדגימה לאיתור עגבת של מערכת העצבים באדם עם סרולוגיה חיובית בנסיוב.
 8. לדגימות מיילוד יש לשלוח בנוסף דגימת נסיוב מהאם (היולדת).
 9. יש לאחסן את הדגימות בקירור ולהימנע מהקפאה והפשרה של הדגימה.
 10. המבחנות המכילות דגימות תשלחנה באריזה נוקשה, מסומנת במדבקת BIOHAZARD. דגימות בעלות גורמי סיכון גבוהים כגון: HIV, HBV, HCV, יש לשלוח באריזה נפרדת המסומנת בצורה בולטת במדבקת אזהרה (בצבע אדום) "זהירות: סיכון ביולוגי".
- הערה: דף התוצאות לא יועתק או ישוכפל, אלא במלואו, ולאחר אישור בכתב מטעם המעבדה. אחריותנו לתוצאות מותנית בכך שהדגימות נטלו, נשמרו ונשלחו בהתאמה להנחיות המרכז הארצי.**

_____ חתימת מנהל המרכז:

_____ תאריך:

מעדכנת/מאשרת: יעקב/סלעית	מקושר לנהל קבלת דגימות קליניות 300001	מספר טופס: 1-DTCSYPH-300001		
	תאריך תחולה: 07.01.15	1	מתוך: 1	דף מס':