



טופס בקשה לבצוע תבחנים סרולוגיים לאבחון עגבת בדגימות נסיוב/CSF

המוסד השולח:

המחלקה/המרפאה:

שם הרופא המטפל:

טלפון לבירורים:

מספר חולה/ מספר דגימה:

תאריך נטילת הדגימה:

תוצאות תבחנים סרולוגיים לעגבת במוסד השולח:

שם הנבדק/ת:

שם משפחה שם פרט

מס' זהות:

תאריך לידה:

מין: ז / נ נשוי/אה: כן / לא ילדים (מספר):

אישה הרה (גיל ההריון בשבועות? בחודשים?): ארץ מוצא: שנת עליה:

כתובת:

סימפטומים קליניים:

באם הנבדק/ת מקבל/ת טיפול:

תאריך	שם ותפקיד	חתימה
.....

הנחיות למשלוח דגימות למרכז הארצי לעגבת:

- יש לשלוח 2-3 מ"ל של דגימת נסיוב ו/או נוזל שדרה, מהוצאה טרייה (תוך 48 שעות), במבחנת פלסטיק (75x12) פקוקה היטב. במקרים מיוחדים ניתן לשלוח דגימה בנפח קטן יותר שאינו קטן מ 0.5 מ"ל.
- יש לצרף טופס נלווה לדגימה הנשלחת ובו פרטי הנבדק ותאריך נטילת הדגימה.
- יש לסמן את מבחנת הדגימה והטופס הנלווה בסימון חד-חד ערכי זהה.
- אין לשלוח דגימת דם מלא (גם לא במבחנת ג'ל).
- אין לשלוח דגימת נסיוב המוליטית או שומנית או עכורה כתוצאה מזיהום.
- אין לשלוח דגימת נוזל שידרה דמית.
- אין לשלוח דגימת נוזל שדרה לניפוי, אלא כדגימה לאיתור עגבת של מערכת העצבים באדם עם סרולוגיה חיובית בנסיוב.
- לדגימות מיילוד יש לשלוח בנוסף דגימת נסיוב מהאם (היולדת).
- יש לאחסן את הדגימות בקירור ולהימנע מהקפאה והפשרה של הדגימה.
- המבחנות המכילות דגימות תשלחנה באריזה נוקשה, מסומנת במדבקת BIOHAZARD.
- דגימות בעלות גורמי סיכון גבוהים (HIV, HBV, HCV), יש לשלוח באריזה נפרדת ולציין את גורם הסיכון.