



מדינת ישראל
משרד הבריאות
המחלקה למעבדות

חוזר המחלקה למעבדות מספר 02/2008

חוזר זה מחליף חוזר מספר 01/98 מתאריך 19.01.1998

יום רביעי, פברואר 13, 2008
ז' באדר א', התשס"ח
סימוכין : 02593408

לכבוד :
מנהלי מעבדות מיקרוביולוגיות / אימונולוגיות / סרולוגיות / זיהומיות

הנדון: תבחינים סרולוגיים לאבחון עגבת ושליחת דגימות למרכז הארצי

רקע:

להלן קווים מנחים למעבדות המבצעות תבחינים סרולוגיים לאבחון עגבת:

1. מעבדה הבודקת דגימות נסיוב או CSF של נבדקים החשודים בהזדקקות בעגבת, חייבת לבצע תבחיני סיקור בשתי שיטות. אחת מהשיטות חייבת להיות איכותית וכמותית, כמו: VDRL או RPR והשניה ספציפית, כמו: ELISA, TPHA או FTA.
2. הדיווח חייב לכלול את תוצאת הבדיקה וכן ציון מדויק של השיטה שלפיה בוצע התבחין. מעבדות שאינן מבצעות תבחין VDRL או RPR בשיטה כמותית, יעבירו את הדגימה למעבדה אחרת לביצוע תבחין כמותי.
3. כאשר מתקבלת תגובה שלילית בתבחין שאינו ספציפי (VDRL או RPR) וחיובית בתבחין ספציפי, יש לחזור על התבחין הבלתי ספציפי באופן כמותי, על מנת למנוע תופעה של Prozone phenomenon false negative.
4. כאשר התגובה חיובית לפחות באחת השיטות, חובה לשלוח את הדגימה לבדיקת אימות, במרכז הארצי לעגבת, המעבדה לבריאות הציבור ע"ש פליקס, דרך בן צבי 69, אבו-כביר, ת"ד 8255 תל-אביב 61082.
5. הדגימה צריכה להישלח באופן בטיחותי ובהתאם לנוהל המחלקה למעבדות SF-51-001/5 בנושא "שינוע חומרים ביולוגיים זיהומיים ודגימות לאבחנה רפואית מעבדתית". בנוסף לדגימה יש לשלוח טופס המפרט את פרטי הנבדק ותוצאות הבדיקות במעבדה השולחת.



מדינת ישראל
משרד הבריאות
המחלקה למעבדות

במרכז הארצי לעגבת מבוצעים תבחיני הסיקור הבאים :

- תבחין לא ספציפי : VDRL המבוצע באופן איכותי וכמותי ;
 - תבחין ספציפי : TPHA ;
 - במידה ולפחות באחד משני התבחינים התקבלה תגובה חיובית, יבוצע תבחין FTA לאישור סופי.
- מעבדה המבצעת תבחינים לאבחון עגבת, חייבת להשתתף בתכנית בין מעבדתית לבדיקת מיומנות (PT).

בברכה

ד"ר עמנואל גזית
מנהל המחלקה למעבדות

העתק:

ד"ר חזי לוי, ראש מינהל הרפואה
ד"ר איתמר גרוטו, ראש שרותי בריה"צ
ד"ר פול סלייטר, מנהל המחלקה לאפידמיולוגיה
ד"ר אמיליה אניס, המחלקה לאפידמיולוגיה
מנהלי מעבדות
מנהלי המעבדות לבריה"צ
מנהל מרכז ארצי לעגבת

תיק:

חוזרים
שוטף

עג/א